



## ABRIR

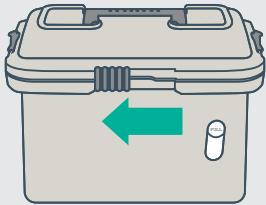


- 1 Deslice la cerradura frontal para la izquierda.

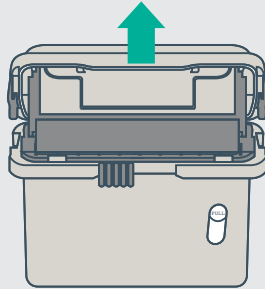


- 2 Levante la tapa hasta que quede abierta.

## JERINGAS

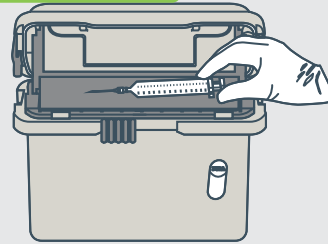


- 1 Coloque la jeringa horizontalmente en la bandeja.

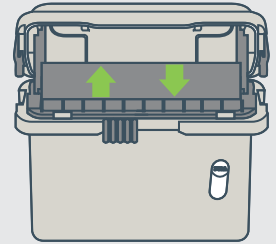

- 2 La bandeja se vaciará sola.


## AGUJAS LIVIANAS

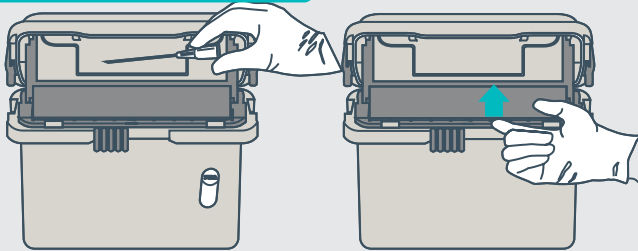

- 1 Coloque la jeringa horizontalmente en la bandeja.

- 2 La bandeja se vaciará sola.

## LLENO

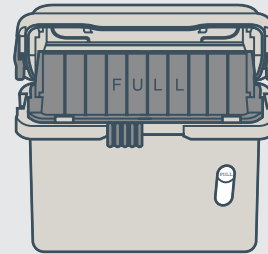


Cuando la bandeja permanece vertical, el contenedor esta lleno.

## CERRAR




- 1 Oprima los dos soportes laterales hacia adentro, y cierre la tapa.

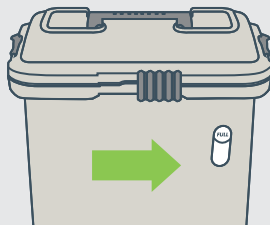

- 2 Deslice la cerradura frontal totalmente a la derecha.

## BLOQUEAR

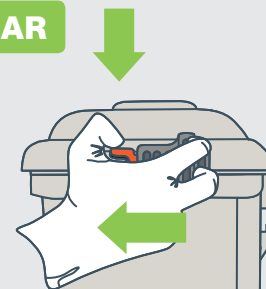

**ATENCIÓN**  
Las cerraduras laterales son permanentes!

- 1 Presione las lengüetas rojas.

- 2 Deslice las cerraduras totalmente hacia adelante.

### Recuerde

Nunca ponga sus manos dentro del contenedor.  
Siempre cierre el contenedor antes de moverlo o retirarlo.  
No desfigure o escriba en el contenedor.  
Siempre deseche objetos corto-punzantes dentro de contenedores apropiados.